

# Anwendung des Fäkalkollektors

## Anleitung für das Pflegepersonal

Autorin: Katharina Dubi Pflegefachfrau Viszeralchirurgie, Lindenhofspital Bern, Juni 2017

Dünnflüssiger, wässriger und häufiger Stuhlgang tritt oftmals nach Darmeingriffen, bei Vorbereitungen für eine Untersuchung, aber auch bei Infektionserkrankungen auf. Nicht selten sind erschöpfte, schlecht mobile und ältere Personen davon betroffen. Durch wiederkehrende Feuchtigkeit, Wärme, mechanische Reize und Fäkalien wird die Haut stark belastet. Die natürliche Schutzfunktion der Haut ist herabgesetzt und wird anfälliger für Hautreizungen, diese sind gekennzeichnet durch Rötung, schmerzhaft Entzündungen bis zu Sekundärinfektionen.<sup>1-2</sup>

### Behandlungsziel

#### Hautschutz

**Wohlbefinden und Sicherheit des Patienten erhöhen**  
**Kosten senken, Effizienz erhöhen**

#### Anwendung Fäkalkollektors<sup>1-2</sup>

1



##### Vorbereitung

- Seitenlagerung des Patienten.
- Intimtoilette mit pH neutraler Seife, trocknen mit Longuetten um zusätzliche Reizung zu vermeiden.
- Haare im perianalen Bereich entfernen, (Vorsicht mit Rasierer, besser Haar mit Schere möglichst dicht an der Haut abschneiden).
- Hautschutz mit Cavilon™ oder mit Benzotinktur (unterstützt die bessere Haftung der Platte).

2



##### Applikation

- Entfernen der Folie 1 und 2.
- Hautschutzplatte in der Mitte falten.
- Gesässhälften gut auseinander ziehen.
- Schmäler Teil beim Damm und den breiteren Teil in der Steissbeingegend positionieren und gut andrücken. Mindestens 30 Sekunde.
- Danach Schutzpapier 3 und 4 nacheinander entfernen und wiederum gut an die Haut drücken.

3



Tipps: Bei Hautunebenheiten kann zur besseren Haftung unter der Hautschutzplatte Paste angewendet werden.  
 Hautschutzplatte vor dem applizieren vorwärmen, sind danach besser positionierbar.

4



##### Evaluation

- Systemhaftung
- Lagerung des Patienten
- Abfluss des Systems gewährleistet
- Befindlichkeit des Patienten erfragen

#### Literaturverzeichnis:

1. Prolife-Kontinenz Fäkalkollektor Dokument, [www.prolife-kontinenz-expert/faekalkollektor](http://www.prolife-kontinenz-expert/faekalkollektor) (Stand 16.06.2017)

2. Herstellerinfos: Hollister Incorporated Feecal Collectors, ConvaTec Inc. Feecal Collector

Bilder: Katharina Dubi